

Guía Rápida de Alcohawk PRO

Lea el manual de propietario entero y siga los procedimientos cuidadosamente para obtener resultados exactos.

Instrucciones de operación

ESPERE 20 MINUTOS DESPUÉS DE FUMAR, COMER O BEBER ANTES DE USAR. DE LO CONTRARIO PUEDE ALTERAR LA LECTURA DE CAS Y DAÑAR EL SENSOR.

Si no espere 20 minutos antes de hacer análisis, la lectura mide el alcohol en la boca, lo que no indica el contenido del alcohol en la sangre. En adición, no esperar para el tiempo requerido se puede dañar el sensor y causar lecturas inexactas en el futuro.

1. **PRESIONE** el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**. El detector comenzará un conteo de 200 a 000 en la pantalla. Este proceso prepara el sensor y el circuito para la prueba.


2. Sonará un **PITIDO** y encenderá la luz verde **DISPONIBLE**, haga una inhalación profunda y sople continuamente dentro de la **BOQUILLA** hasta que sonará otro **PITIDO**. Soplará por cinco segundos. Forme un sello alrededor de la boquilla mientras que sople. Aviso de no cubrir el **ORIFICIO de ESCAPE** en la unidad. Si no sople adentro de 30 segundos, la unidad despliega **"APAGADO"**. Presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO** para apagar la unidad y repita el primer paso.

3. Cuando las luces verdes y rojas parpadean en la pantalla por 4 segundos, los resultados de la prueba se despliega con 3 dígitos por 15 segundos. Este número es la (%CAS) concentración del alcohol en la sangre.

- Si la lectura CAS es más de 0,05% la luz roja de **AVISO** parpadeará con un **PITIDO**.
- Si la lectura CAS es más de 0,04%, la pantalla indicará **"CALIENTE"** y la luz roja de **AVISO** parpadeará con un **PITIDO**. Este también ocurre cuando el sujeto sopla alcohol de su saliva en la unidad.
- Si se consume solo un poco del alcohol, su concentración actual será menos de 0,01% CAS (Concentración del Alcohol en la Sangre), y no se activa la lectura. Sin embargo, la pantalla despliega 0,00%.
- Si se despliega ErH, refiera a la sección del manual MENSAJES de ERROR.

4. Por fin, el dispositivo despliega **"APAGADO"** para apagarlo, con un **PITIDO**. Presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO** para apagarlo.

5. Para hacer otros análisis, repita los pasos 1 – 4. Espere al mínimo de 2 minutos.

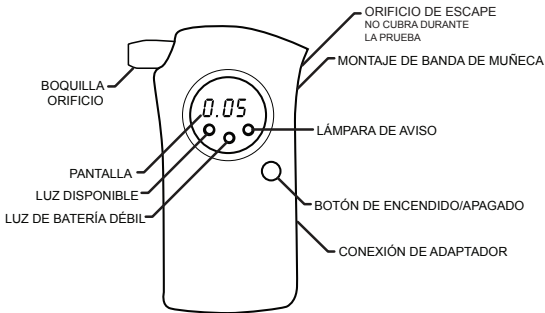

NO CONDUZCA CUANDO BEBA ALCOHOL

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA ENTENDER LOS RESULTADOS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE RE-CALIBRACIÓN QUE SE NECESITE HACER CADA 6-12 MESES.

ESTE DISPOSITIVO NO SE INTENTA A MEDIR EL ALCOHOL EN EL ALIENTO HUMANO.