


AlcoHAWK® PT500 La Guía Rápida

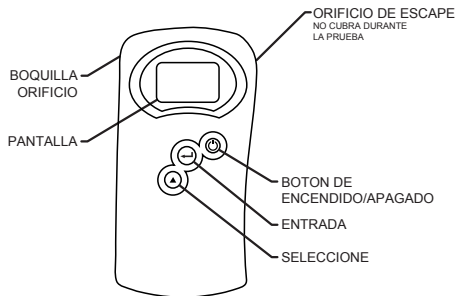

Lea el manual de propietario entero y sigue los procedimientos cuidadosamente para obtener resultados exactos.

Instrucciones de Operacion

Espera **20 minutos** después de fumar, comer, o beber antes de usar. De lo contrario puede alterar la lectura de CAS y dañar el sensor.

- Paso 1)** Presione el botón de ON/OFF(ENCENDIDO/APAGADO) por un segundo hasta que suena el pitido. El detector lee "Initializing..." (Inicializando) como se prepara para el uso.
- Paso 2)** La pantalla dice, "Test" y "Options" (Prueba y Opciones). Para iniciar una prueba, presione el botón, ENTER. El detector dice, "Blow Now" (Sople Ahora). Haga una inhalación profunda, ponga los labios alrededor de la boquilla orificio, y sople continuamente por cinco (5) segundos. El detector hace un pitido cuando el sujeto empieza a soplar y otra vez después de obtener la muestra. No cubra el ORIFICIO DE ESCAPE.
- Paso 3)** El detector despliega "Processing" (En Proceso) cuando analiza la muestra. Después de tres (3) segundos, el detector le da la estimación del CAS.
- Paso 4)** El detector despliega los resultados de la prueba por 90 segundos antes de hacer dos pitidos y apagar.
- Paso 5)** Para apagar el aparato, presione el botón de ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) por un segundo.

Para ver otras opciones del menú, presione el botón, SELECT (A). Consulte el manual para detalles y opciones del menú.

ESTE DISPOSITIVO NO SE INTENTA A MEDIR EL ALCOHOL EN EL ALIENTO HUMANO.

NO CONDUZCA CUANDO BEBA ALCOHOL.

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA ENTENDER LOS RESULTADOS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE RE-CALIBRACIÓN QUE SE NECESITE HACER RUTINARIO.

